

思いやりと優しさをカタチに

CURANS



カーボンアームが体幹を支持、
簡単装着でサツと歩行訓練

SATWALKER

サットウォーカー

- 2本のカーボンパイプがご利用者の体幹を支持し、歩行訓練を安全にサポート。
 - 歩行訓練時の転倒リスクを軽減します。
 - 工事不要!既存のトレッドミル (幅約90cmまで) の上に置くだけで使用できます。
 - オプションの体重依存度メーターは、トレーニング時の機器への体重依存度をkg単位で確認可能。
- ※機器への依存度を可視化することで利用者の日々の変化を把握し、コンディションに合わせた調整とトレーニング効果を管理できます。
USBに体重依存度記録 (エクセルファイル) を保存でき、利用者の体調管理に役立ちます。



高さは3段階で調整が可能、約235cm、245cm、255cm。
(ご使用時は、必ず固定してください。)



〈設置例〉社会福祉法人協会 特別養護老人ホーム
グリーンハウス様 (大阪府堺市)



ご利用者のコンディションに合わせてリフトの高さを電動で微調整可能。



トレーニングデータをUSBにて書き出しPCで保存、管理できる体重依存度メーター。

商品説明や実際の操作方法などホームページや動画でご確認頂けます。

サットウォーカー info@curans.co.jp



HP



動画

製造販売元

株式会社クワランス

〒673-1451 兵庫県加東市家原245-5 KR事業部
TEL 0795-39-0618 (直通) FAX 0795-39-0618 mail: info@curans.co.jp

定格・仕様

販 売 名	サットウォーカー
使 用 電 源	交流100V 50-60Hz
消 費 電 力	161.4W
一 般 名 称	体幹支持式歩行トレーニング装置
質 量	本体: 約14kg / フレーム: 約74.5kg
フ レ ー ム	高さ (三段階調節) 約235cm / 約245cm / 約255cm
外 形 寸 法	幅約110cm × 奥行約108cm
	幅約90cmまでのトレッドミルにセット可能